



MURNAUERS

snoreeze

Eine Hauptursache für das Schnarchen liegt in der Erschlaffung des Weichteilgewebes im Mund- und Rachenraum. Beim normalen Ein- und Ausatmen wird dieses erschlaffte Gewebe leicht angesaugt und in Schwingung versetzt. Dadurch entstehen die typischen Schnarchgeräusche.

Snoreeze hilft das betroffene Gewebe geschmeidig zu machen und kann dadurch Schnarchgeräusche verringern.



Anwendung:

1. Ein Snoreeze Gaumen-Strip entnehmen.
2. Leicht an den Gaumen drücken und auflösen lassen (20-30 Sek.). Danach nicht essen oder trinken (andernfalls: Anwendung wiederholen). Auf den Genuss von Alkohol sollten Sie in der letzten Stunde vor der Anwendung verzichten.
3. Bei Bedarf kann mehr als ein Snoreeze Gaumen-Strip pro Nacht verwendet werden.

Hersteller:



• Passion For Life
Healthcare Ltd.,
55 High Street,
Epsom, KT198DH, UK

Vertrieb:

Murnauer Markenvertrieb GmbH,
63468 Trebur



Medizinprodukt 0459